

CPAP Quick Start




Commencer la thérapie

1. Appliquez le masque correctement, comme indiqué par l'intervenant (voir les photos sur le sac du masque).
2. Appuyez sur le bouton START/STOP en haut de votre appareil. Si vous voulez commencer à une pression plus basse, appuyez ensuite sur ce bouton.



Arrêter la thérapie

1. Appuyez sur le bouton START/STOP en haut de votre appareil.
2. Enlevez votre masque.
3. Le rapport de sommeil sur votre écran indique maintenant combien d'heures vous avez utilisé votre appareil.

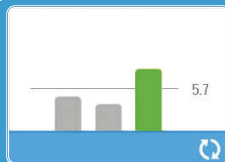


 > 4h

 < 4h

Utiliser MINIMUM 4h chaque nuit !



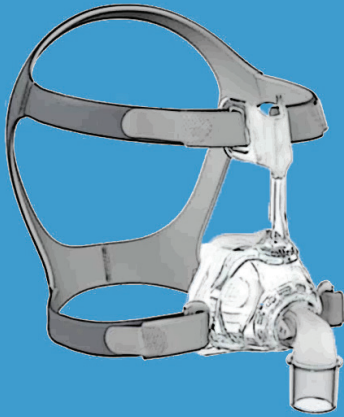

Masque

1

Tous les jours

Laver à l'eau tiède
avec du savon

2

Toutes les semaines

1 à 2x par semaine
avec du savon doux

3

Tous les mois

Laver les sangles
(à la main ou dans un filet
à la machine à laver max
30°C)

1

**Bleu : 1x
par semaine**

Rincer / souffler

2

**Bleu :
Tous les 6 mois**

Remplacer le filtre

3

**Bleu clair :
Filtre allergie**

Remplacer tous les
mois (si utilisé)

Filtres

