



Humidificateur

Quick
Start



1

Connecter l'humidificateur à l'appareil CPAP (pour déconnecter = bouton gris)

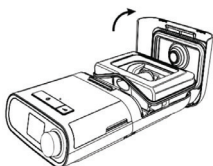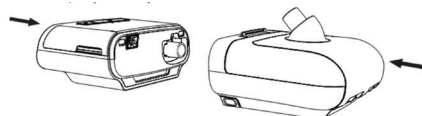


2

Loquet supérieur -> ouvrir

3

Remplir jusqu'au trait MAX

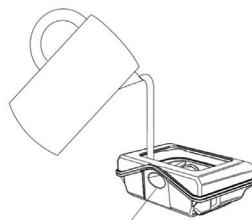

Changer le niveau d'humidité

1

Allumer l'appareil pour qu'il souffle

2

En bas à droite, un chiffre suivi du symbole d'évaporation (3 traits) s'affiche.

3

Le chiffre indique le niveau d'humidification actuel

4

Tourner le bouton rond jusqu'au niveau d'humidification souhaité (standard = 3)



Type d'eau à utiliser

- Eau distillée (pharmacie)

Dépot calcaire

Rincer au vinaigre dilué et à l'eau chaude
Diluer 1 volume de vinaigre dans 10 volumes d'eau.

Entretien humidificateur

Tous les jours

- Changer l'eau
- Débrancher le tuyau, égoutter et sécher

Toutes les semaines

- Nettoyer au savon
- Rincer le tuyau

Conseils pour éviter la condensation

1

Placer l'appareil au sol

2

Fenêtres fermées

3

Température douce dans la pièce

4

Garder le tuyau au chaud sous les draps

5

Ajuster le niveau d'humidité sur l'appareil

