

Humidificateur


Quick

Start

Airsense 11

1

Retirer la pièce latérale de votre appareil CPAP en pressant le bouton du haut

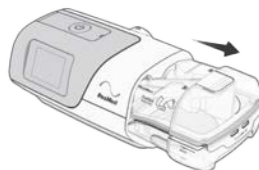


2

Remplir le réservoir avec de l'eau sans calcaire (remplir +/- max)

3

Glisser le réservoir dans l'ouverture de votre appareil

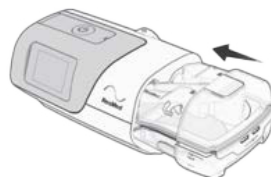

Changer le niveau d'humidité

- 1 Appuyer sur l'icône en forme de maison en haut à gauche de l'écran. Si l'icône n'apparaît pas, passer directement à l'étape 2.
- 2 Sélectionner «Mes Options» (en bleu).
- 3 Sélectionner «Niveau d'humidité».
- 4 Sélectionner le niveau d'humidité (standard = 4).
- 5 Quitter le menu en appuyant sur l'icône en forme de maison.

Type d'eau à utiliser

- Eau distillée (pharmacie)
- Eau courante (faire bouillir au moins 20min. et laisser refroidir)
- Eau en bouteille

Dépot calcaire

Rincer au vinaigre dilué et à l'eau chaude
Diluer 1 volume de vinaigre dans 10 volumes d'eau.

Entretien humidificateur

Tous les jours

- Changer l'eau
- Débrancher le tuyau, égoutter et sécher

Toutes les semaines

- Nettoyer au savon
- Rincer le tuyau

Conseils pour éviter la condensation

1

Placer l'appareil au sol

2

Fenêtres fermées

3

Température douce dans la pièce

4

Garder le tuyau au chaud sous les draps

5

Ajuster le niveau d'humidité sur l'appareil

